


PRP (plazma bogata trombocitima) je metoda lečenja koja podrazumeva uzimanje male količine pacijentove krvi, njenu obradu radi koncentrisanja trombocita, a zatim ubrizgavanje tako dobijene koncentrisane plazme u ciljano područje. PRP je bogat faktorima rasta i proteinima koji podržavaju regeneraciju i stimulaciju tkiva i zarastanje, zbog čega se široko koristi u oblastima kao što su ortopedija, hirurgija, dermatologija, estetika..

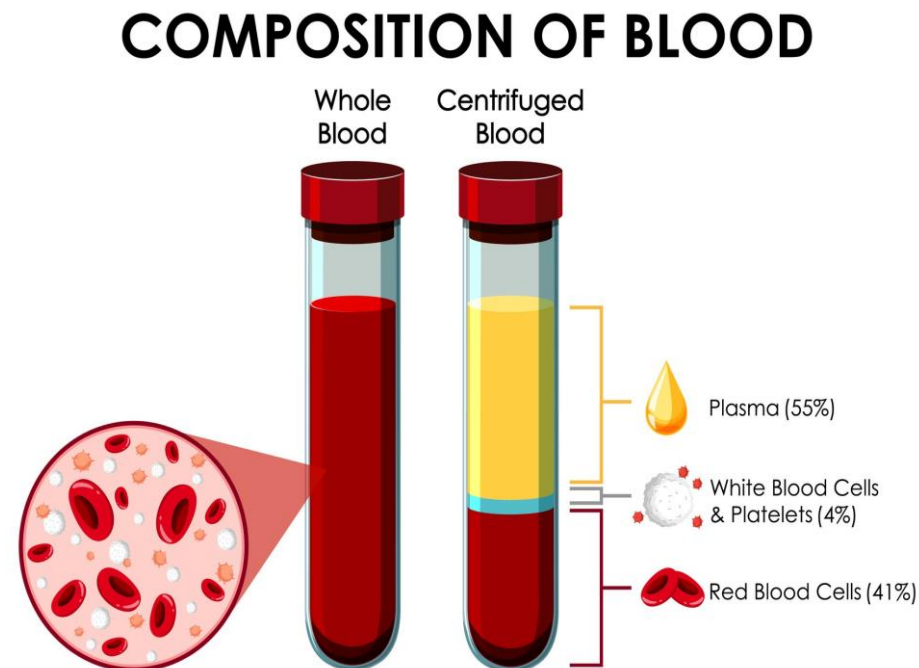

REIN PRP
pure healthy



Uobičajene primene PRP tretmana

PRP (plazma bogata trombocitima) koristi se u različitim medicinskim i estetskim oblastima zahvaljujući svojim regenerativnim i isceljujućim svojstvima. Ključne oblasti primene PRP-a uključuju:

Dermatologija: Podmlađivanje lica, kozmetički tretmani i tretman ožiljaka od akni.

Hirurške specijalnosti: Plastična hirurgija, oralna hirurgija, stomatološke i maksilofacijalne procedure.

Ortopedija: Lečenje povreda zglobova, tetiva i ligamenata, kao i osteoartritisa.

Urologija: Tretmani muškog i ženskog seksualnog zdravlja, uključujući erektilnu disfunkciju i zdravlje karličnog dna.

Ginekologija: Tretmani za vaginalno podmlađivanje, stimulaciju i oporavak nakon porođaja.

Oftalmologija: Pобољшanje zarastanja kod povreda rožnjače i bolesti površine oka.

Regenerativna medicina: Opšta regeneracija tkiva i tretmani zarastanja rana.

Obnavljanje kose: Tretmani gubitka kose i podrška kod transplantacije kose.

Veterinarska medicina: Upotreba PRP-a kod životinja za lečenje povreda tetiva, ligamenata i zglobova, naročito kod sportskih životinja.





REIN PRP MULTI paket od 6 epruveta sastoji se od 6 vakuumskih epruveta od 10 ml, od kojih svaka sadrži 1 ml natrijum-citrata.



REIN PRP DUO kit obezbeđuje sve neophodne alate za izvođenje tretmana u jednom pakovanju. Ovaj set sadrži 2 epruvete, špric, igle i holder za iglu.



REIN PRP

pure healthy



REIN PRP DUO kit pruža sve alate koji su potrebni tokom tretmana u jednom pakovanju, 100% sterilan, obezbeđujući brzu i bezbednu primenu, što povećava prihvatanje tretmana od strane pacijenata. Imajući u vidu lekare koji preferiraju višu koncentraciju PRP-a u jednoj aplikaciji, u set smo uključili 2 vakuumske epruvete od 10 ml, od kojih svaka sadrži 1 ml natrijum-citrata.

To su epruvete namenjene za humanu injekcionu primenu, koje ispunjavaju zahteve **CE Class IIB standarda** za natrijum-citrat i prošle su sve neophodne biokompatibilne testove. To je kompletan PRP kit odobren i sertifikovan prema CE standardu.

Sadržaj kita:

- 2 kom vakuumskih epruveta od 10 ml sa 1 ml natrijum-citrata
- 1 kom špric od 5 ml sa luer lock priključkom
- 1 kom spinalna igla 18G 90 mm
- 1 kom držač za iglu (holder)
- 1 kom igla za vakum sistem 21G 0,8×38 mm
- 1 kom igla za špric 21G 0,8×40 mm



Sertifikacija proizvoda:

Naše PRP epruvete poseduju EC sertifikat. U kompaniji Kaizen Endüstri primenjujemo sertifikovani ISO 13485:2016 sistem menadžmenta kvaliteta medicinskih uređaja. Pored toga, naši proizvodi su odobreni od strane MHRA. REIN PRP epruvete su vakuumske epruvete od 10 ml koje sadrže 1 ml natrijum-citrata.

Kvalitet natrijum-citrata:

Koristi se natrijum-citrat koncentracije 3,13%. Natrijum-citrat je nabavljen od proizvođača koji poseduje MSDS i sertifikate analize, a poreklo supstance **je Nemačka**.

Sterilizacija:

Tokom proizvodnje, unutrašnjost epruveta prolazi kroz gama sterilizaciju, a nakon pakovanja primenjuje se ETO (etilen-oksidi) sterilizacija.

Gama sterilizacija koristi gama zrake za eliminaciju mikroorganizama razaranjem njihove DNK, obezbeđujući visok nivo sterilizacije bez zaostalih materija.

ETO sterilizacija podrazumeva primenu gasa etilen-oksida, koji prodire kroz pakovanje i složene strukture kako bi efikasno uništio bakterije i viruse.

Ovi procesi obezbeđuju da je proizvod u potpunosti bezbedan za upotrebu.



Dizajn proizvoda i kvalitet: Cevi imaju standardni oblik epruvete. Ostali materijali korišćeni u setovima odabrani su iz najkvalitetnijih proizvoda; na primer, špricevi su iz globalno renomirane BD marke. Oblik epruveta je kompatibilan sa većinom centrifuga proizvedenih prema svetskim standardima.

Epruvete su kompatibilne sa većinom centrifuga. Ukoliko želite da potvrdite kompatibilnost sa svojim modelom, možete prikupiti podatke kao što su marka/model ili sliku i proslediti ih našem menadžeru proizvoda na verifikaciju.



Blisteri iz kompleta mogu se koristiti i kao držači. Epruvete se nakon centrifugiranja postavljaju uspravno u predviđeni odeljak blistera, koji tada služi kao držač.



DUO

